

Programmierung AED Medtronic CR+



Spracheinstellung:

Gerät nicht öffnen, nur einschalten (rechts seitwärts am Gerät)

1. **Rote** Taste kurz drücken
2. Lautstärke-Taste kurz drücken
3. Rechts-Taste bis LED-Balken auf Position **2** (= **deutsch**)
4. **Rote** Taste kurz drücken (= gespeichert)



Repetitionszeit:

Gerät nicht öffnen, nur einschalten (rechts seitwärts am Gerät)

1. **Rote** Taste kurz drücken
2. Taste "kein Schock" kurz drücken
3. Rechts-Taste bis LED-Balken auf Position **4** (= **60 Sek.**)
(2=30, 3=45, 5=90, 6=120, 7=180 Sek)
4. **Rote** Taste kurz drücken (= gespeichert)

Reanimations-Reihenfolge:

Gerät nicht öffnen, nur einschalten
(rechts seitwärts am Gerät)

1. **Grüne** Taste kurz drücken
2. Elektroden-Taste kurz drücken
3. **Grüne** Taste kurz drücken
(= gespeichert)
Ergibt Reihenfolge: Schock-Schock-
kein Schock-kein Schock



Bemerkungen:

Wenn Geräte noch nach der alten Guidelines 2005 eingestellt sind (erkennbar an einer männlichen Stimme), kann die Sprachwahl deutsch auf einer anderen Position liegen.